




EOVE 70

Função Coaching

Manual de uso

O ecrã Coaching em INEX

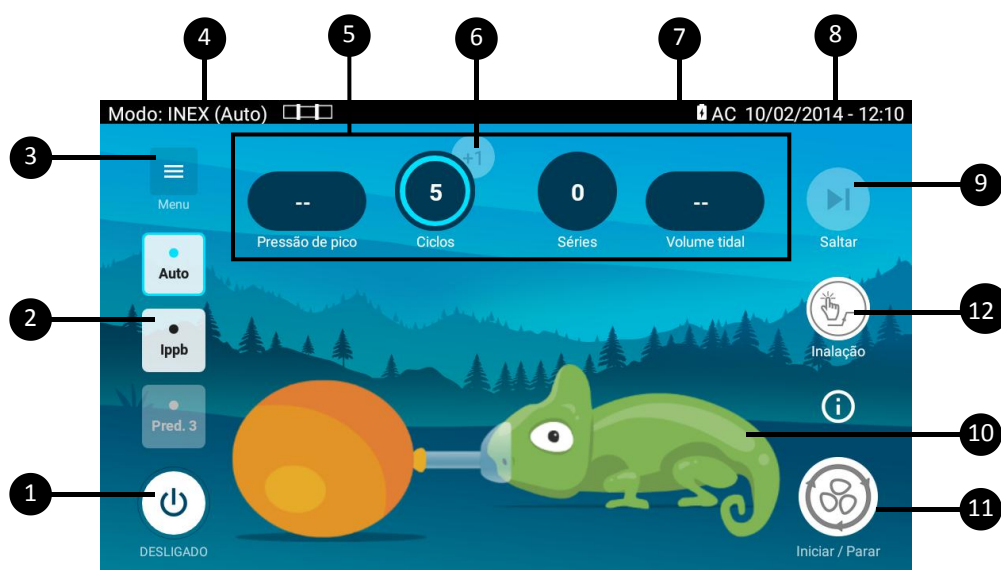


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Botão para desligar2. Predefinições (1-3): Predefinições disponíveis para o paciente.3. Botão menu: Permite aceder aos diferentes menus4. Indicador de modo de tratamento: INEX (manual/Auto) ou IPPB5. Monitorizações de tratamento: apresenta os valores monitorizados em tempo real durante o tratamento.6. Botão de adicionar ciclo: permite adicionar um ciclo ao tratamento em curso, se necessário. | <ol style="list-style-type: none">7. Indicador de carga da bateria: indica o nível de carga restante da bateria ou se a bateria está a carregar.8. Data e hora: Indique a data em formato AAAA/MM/DD e a hora no formato 24 horas. Pode ser alterado no menu de preferências.9. Botão "Avançar": permite interromper uma série INEX em curso antes do fim dos ciclos.10. Camaleão: Animação que acompanha o tratamento configurado para auxiliar o paciente.11. Botão iniciar/parar: inicia ou para o tratamento.12. Botão Trigger: permite iniciar manualmente uma inspiração durante um tratamento. |
|--|--|


Utilização da função Coaching para realizar um tratamento em modo INEX

Selecionar uma predefinição em INEX Auto e iniciar o tratamento. O camaleão e o balão vão acompanhar as diferentes fases do tratamento:

- Durante a inspiração, o camaleão sopra e o balão esvazia.

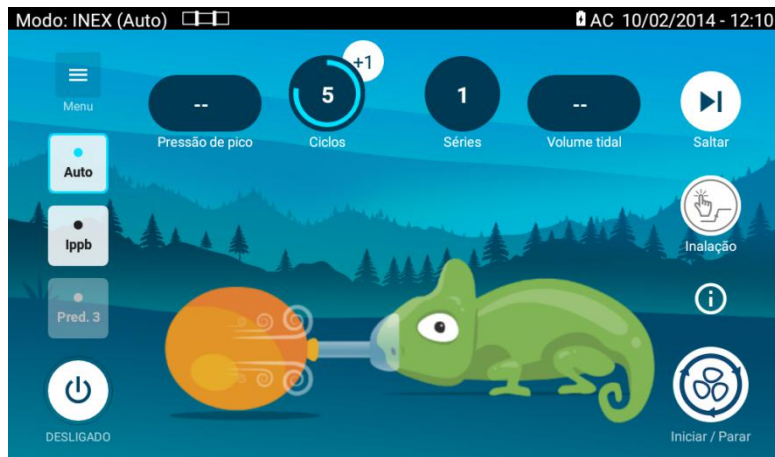

- Durante a expiração, o camaleão expira e o balão enche.

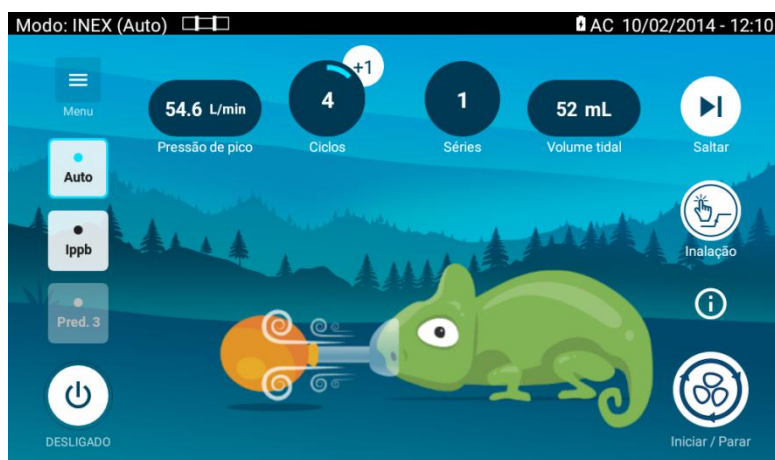

- Durante a pausa, nem o camaleão nem o balão se mexem.

As monitorizações:


- O fluxo do pico é atualizado após cada expiração.
- O contador de ciclos diminui após cada expiração. Pode ser incrementado com o botão "+1" durante o último ciclo.
- O contador de série é incrementado após o início de cada ciclo. É repostado a zero quando a predefinição é alterada e quando o aparelho é desligado.
- O volume é atualizado após cada inspiração.

No final do tratamento (ou à paragem do tratamento com o botão "Avançar"), surge uma janela a perguntar ao paciente se vai ser realizada uma nova série ou não.



O temporizador é indicativo. Clique em "Avançar a pausa" para reiniciar uma série ou "Fim do tratamento" para parar o tratamento.

O ecrã Coaching em IPPB

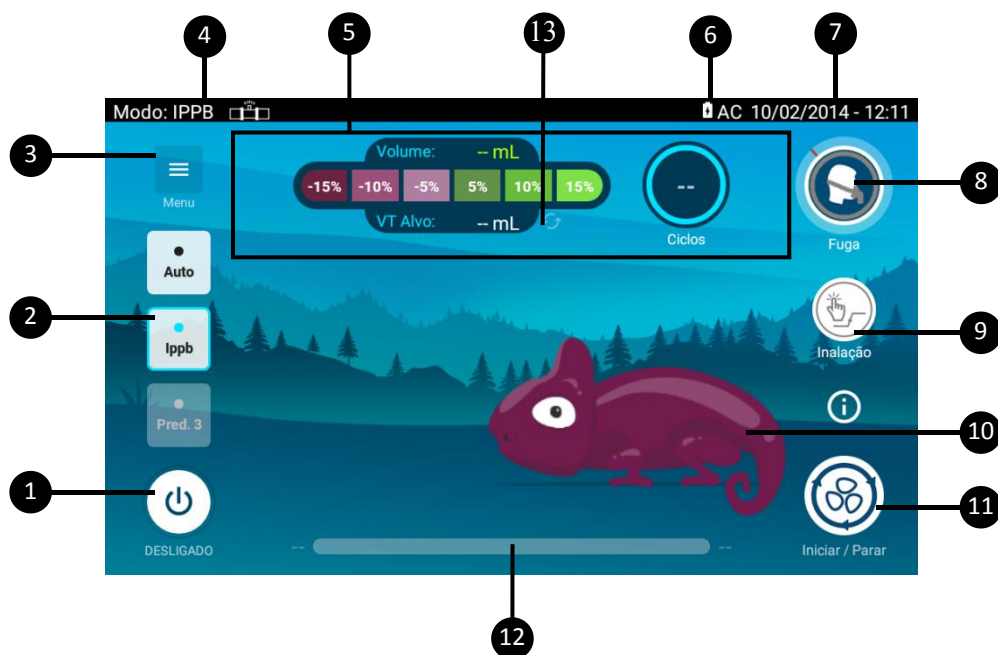


<ol style="list-style-type: none"> 1. Botão para desligar 2. Predefinições (1-3): Predefinições disponíveis para o paciente. 3. Botão menu: Permite aceder aos diferentes menus 4. Indicador de modo de tratamento: INEX (manual/Auto) ou IPPB 5. Monitorizações de tratamento: apresenta os valores monitorizados em tempo real durante o tratamento. 6. Indicador de carga da bateria: indica o nível de carga restante da bateria ou se a bateria está a carregar. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Data e hora: Indique a data em formato AAAA/MM/DD e a hora no formato 24 horas. Pode ser alterado no menu de preferências. 8. Indicador de fuga 9. Botão Trigger: permite iniciar manualmente uma inspiração durante um tratamento. 10. Camaleão: Animação que acompanha o tratamento configurado para auxiliar o paciente 11. Botão iniciar/parar: inicia ou para o tratamento. 12. Barra de tempo de tratamento: indica o tempo de tratamento passado e o tempo de tratamento restante 13. Reposição do volume alvo anteriormente definido
---	---

Utilização da função Coaching para realizar um tratamento IPPB

Selecionar uma predefinição em modo IPPB e iniciar o tratamento. Após a configuração, a inspiração tanto pode ser acionada pelo paciente como pelo botão dedicado.

A monitorização do Volume apresenta a evolução em tempo real do volume durante a inspiração. Esta monitorização permanece no valor do volume final até à próxima inspiração. O contador de ciclos é aumentado no início de cada inspiração.

No final de cada inspiração, as fugas da interface são avaliadas e o indicador de fuga  fica verde ou laranja. Um indicador laranja indica que há muita fuga na interface do paciente e que deve ser ajustada.

Durante a inspiração, o camaleão vai soprar em conformidade com a proporção do volume alvo previsto. Vai mudar progressivamente de cor para o verde, à medida que o volume é atingido e o volume alvo é ultrapassado.

Para as 3 primeiras inspirações:

- O camaleão não se mexe
- A monitorização do Volume Alvo permanece indefinida

Após 3 inspirações:

- o Volume Alvo é definido. É o volume médio das 3 primeiras inspirações. Permanece inalterado até ao final do tratamento.

Durante a expiração, o camaleão vai soprar progressivamente até voltar ao tamanho e à cor iniciais. Permanecerá assim até à próxima inspiração. A seta do gráfico de volume desloca-se no sentido da proporção do volume alvo previsto. Permanecerá no nível máximo atingido até à próxima inspiração.

